

# Espejo Laríngeo

## Descripción

- El espejo Laríngeo es un instrumento utilizado para el examen de Laringoscopia Indirecta, procedimiento que permite visualizar estructuras anatómicas de la Laringe de forma no invasiva, accesible y rápida.



## Características

- Zona de toma antideslizante
- Fabricado en acero inoxidable 420
- Esterilizable
- Largo 13 cms
- Peso 16 Grs
- Diámetro mango 0.5 cm
- Espejo Diámetro 22 mm (N° #6)



## Instrucciones para una correcta limpieza y desinfección de los espejos dentales

- **Prelava** el espejo con agua, arrastra los restos orgánicos como saliva, sangre, etc.
- **Sumerge en detergente enzimático** el espejo laríngeo para evitar que se adhieran restos orgánicos a la superficie.
- **Enjuaga** el espejo dental **con abundante agua** hasta que se elimine cualquier residuo del detergente.
- **Sécalo** con un paño que no desprenda pelusas o con aire a presión.
- **Inspecciona** el espejo para corroborar que no presenta ningún resto.
- **Empaqueta** el espejo en una bolsa de esterilización. Puedes empaquetarlo de forma individual o junto con otros instrumentos de exploración y diagnóstico que vayas a utilizar en un mismo paciente.
- **Sella** el empaquetado.

- **Esteriliza** los espejos embolsados metiéndolos en el autoclave cuyo mantenimiento debe realizarse en función de las recomendaciones del fabricante.
  
- **Almacénalos** en ambientes con temperatura y humedad controlada, evitando la compresión y rotura de las bolsas para garantizar la esterilidad del espejo hasta el momento de su uso.
  
- Código: 10019