

Rodillo Estimulador Térmico PróFono

Descripción

- El estimulador térmico PróFono, diseñado por la Fonoaudióloga Elisa Bento de Carvalho Altmann, tiene como objetivo estimular la sensibilidad térmica y el consiguiente aumento de la propiocepción. El estímulo frío se considera más efectivo, ya que hay un mayor número de estos receptores. Además, la sensación de frío permanece durante unos segundos incluso después de retirar el estímulo.
- Se puede usar en varias patologías del habla e incluso en bebés recién nacidos.
- Modo de uso: Retire la tapa de un extremo del tubo de aluminio y coloque agua fría o caliente dentro de él, según el tipo de estímulo deseado. El tubo con agua se puede colocar directamente en el congelador. Su objetivo principal es ser utilizado en la cara, más específicamente en los labios, debido a su gran respuesta a la temperatura, especialmente al frío. La estimulación térmica debe realizarse de una a tres veces al día, según lo recomendado por la Fonoaudióloga responsable.



Características

- Tubo de aluminio.
- Varilla de acero galvanizado
- Precauciones: cuando el estimulador térmico se coloca en el congelador, llene solo el 80% del tubo de aluminio con agua debido a la expansión del líquido. Para evitar quemaduras en la cara cuando se llena con agua tibia, se recomienda probar la sensibilidad a la temperatura en la parte superior del logopeda o tutor antes de usar.

Código: 10045