

ETTO

Estimulador Térmico Oral

Modo de aplicación, uso y cuidado

- ETTO es un estimulador térmico para ayudar a mejorar la motricidad oral y las deficiencias faríngea de la deglución de los clientes pediátricos y adultos.
- Totalmente sellado, su núcleo de gel se congela para una estimulación térmica; puede ser reusado por el tiempo que la terapia lo considere.
- La medida es 11 cms. de largo (excluyendo el mango) y 1 cm de diámetro
- Es uso exclusivo de cada paciente y debe ser limpiado antes de ser usado



Uso

1. Congelar el ETTO hasta lograr la rigidez necesaria para el paciente. Adicionalmente puede ser sumergido en sustancias dulces o amargas para la estimulación sensorial.
2. Explique el procedimiento al paciente y la capacidad de respuesta a esperar.
3. Si el paciente no responde a los comandos orales y no abre su boca, aplicar el EETO en sus labios y mejillas para provocar apertura de la boca. En algunos casos, puede ser apropiado para el clínico utilizar su dedo pequeño en los labios del paciente para penetrar la cavidad, tirándolos hacia afuera para que el ETTO pueda ser insertado.
4. Si el paciente es capaz de responder a los comandos, pedir que abra su boca e insertar un dedo en la cavidad bucal.
5. Una vez que el ETTO este en la boca se producirá la succión voluntaria o reflexiva, y la manipulación motora oral.

Alternativas de tratamientos terapéutico:

- A. Inserte el ETTO en la cavidad oral con instrucción para succionar de 5 a 10 veces, luego retire el ETTO y el terapeuta deberá observar una respuesta de tragado. Esto se debe repetir un promedio de 10 ensayos repetitivos.
- B. Inserte el ETTO en la cavidad oral con instrucción para succionar de 5 a 10 veces y observe el comportamiento “antes” de retirar el ETTO. El terapeuta debe observar que haya una respuesta de succión. Con el ETTO aun dentro de la cavidad. Repetir a lo menos 10 veces por terapia
- C. Inserte el ETTO en la cavidad oral con una instrucción específica por un periodo de 15 segundos. Mueva el ETTO y el terapeuta deberá observar por respuesta la succión. Repetir a lo menos 10 veces por terapia.
- D. Inserte el ETTO en la cavidad oral usando la longitud máxima de tolerancia del paciente. Observar por respuesta de succión, a que punto de inserción el paciente succiona o manipula el ETTO.

Nota: Por largas sesiones, el ETTO se debe colocar en una taza de hielo para mantener su rigidez entre los ensayos terapéutico.

Limpiado y mantenimiento

- Limpie cuidadosamente el ETTO antes de ser usado
- Lavar a mano con detergente suave y enjuague a fondo para eliminar todos los residuos
- Si se provocan fugas no lo bote en el drenaje porque se puede tapar. Limpiar su contenido y deshágase adecuadamente de ellos. Limpie el piso para evitar caídas y lávese las manos
- El ETTO puede ser usado repetitivamente por el cliente hasta que alcance los resultados deseados.
- Nunca use el ETTO con más de un cliente
- Después de cada uso, se debe enjuagar y colocar en un recipiente estéril y volver a congelar hasta que la intervención clínica haya terminado

Contraindicaciones

El ETTO no debe ser usado por pacientes que:

- Exhiben reflejo de mordida tónica
- Están incapacitados de mantener niveles adecuados de saturación de oxígeno (90%-100%) incluso con máscaras de oxígeno suplementarias por cánula nasal.
- Exhiban bradicardias o taquicardias extremas debido a problemas cardiacos significativos.

Precauciones

- Si se produce una fuga, interrumpa el uso de inmediato y deseche el producto adecuadamente.
- No se recomienda su uso en estado líquido.
- Procedimientos de emergencia y primeros auxilios: si se ingiere, NO induzca el vómito a menos que lo indique un médico o un centro de control de intoxicaciones. Busque atención médica inmediata. Si se produce contacto con los ojos, enjuague con agua durante varios minutos. Obtenga atención médica si la irritación persiste. Para contacto con la piel, lavar con agua y jabón

Contenido

- Cubierta exterior: PVC resistente al mordisco, sin látex
- Relleno: gel no tóxico

Código: 10046