

# Bolígrafo propioceptivo PróFono

## Descripción

El Bolígrafo Propioceptivo Pro-Fono es una herramienta vibratoria que se puede utilizar para la relajación, tonificación o propiocepción de la región facial, intra y extraoral. Su suave vibración proporciona una estimulación sensorial táctil dirigida, dentro y fuera de la cavidad bucal.

Este dispositivo funciona bajo un principio mecánico, mediante la vibración de su punta y la consiguiente estimulación mecánica al masajear las regiones trabajadas. Está indicado para ser usado por fonoaudiólogos como herramienta auxiliar con fines terapéuticos y/o estéticos, tanto en individuos sanos como en individuos con síntomas de dolor en los músculos faciales y cervicales.

Puede utilizarse como estímulo para acondicionar la postura correcta de los labios; ayudar en las evaluaciones intraorales para una mejor observación de las diferentes regiones; en ejercicios para mejorar el tono facial, labial y lingual; y en el tratamiento de dolores musculares faciales y cervicales.

El Bolígrafo Propioceptivo Pro-Fono no entra en contacto con el paciente, por lo que puede ser utilizado en varios pacientes, siempre que se limpie antes y después de cada uso como se recomienda.

Las puntas propioceptivas de la pluma propioceptiva Pro-Fono son para uso individual y, por lo tanto, no pueden ser utilizadas por varios pacientes. Sin embargo, pueden ser utilizados por el mismo paciente varias veces, siempre que se limpien antes y después de cada uso como se recomienda.



Sugerencias de uso:

- Punta Orofacial Cóncava Propioceptiva: estimulación de la musculatura extraoral, estimulación del sello labial, relajación de la musculatura extraoral.
- Punta Plano Facial y Cervical Propioceptivo: relajación muscular y / o estimulación de los músculos frontales, maseteros, buccinadores, región cervical.
- Puntos Articulatorios Punto Propioceptivo: estimulación propioceptiva intraoral de los puntos articulatorios (áreas con diámetros menores a 3mm).
- Punta Propioceptiva Intraoral: estimulación de los movimientos linguales (lateralización, elevación, entre otros) y desensibilización intraoral.
- Punta propioceptiva para dolor localizado: punta para regiones dolorosas (facial o cervical).
- Punta Propioceptiva Estimulación Fría: estimulación de la sensibilidad térmica y consecuente mejora del control motor en la región.
- Espátulas de plástico Pro-Fono: estimulación del sellado y los movimientos de los labios; ventaja de estimular mejor la propiocepción intra y extra oral al tener sus dos superficies rugosas.

### **Características**

- Es un dispositivo de plástico ligero de goma que garantiza un agarre antideslizante.
- Juego completo de bolígrafo propioceptivo Pro-Fono:
  - 1 unidad del bolígrafo propioceptivo
  - 1 unidad de cada una de las siete puntas propioceptivas adecuadas (orofacial cóncavo, facial plano y cervical, puntos articulatorios, intraorales, dolores localizados, Estimulación por frío y espátula de plástico Pro-Fono).
- No tiene contacto con ningún componente eléctricamente activo, por lo que también mitiga el riesgo de descarga eléctrica para el paciente.
- El Bolígrafo Propioceptivo Pro-Fono funciona mediante el uso de una unidad de batería AAA (1,2 a 1,5 voltios) (no incluida con el producto), que acciona un micro motor.

Código: 10058