

Roller Tip

Punta para Z Vibe®

Descripción

La punta de rodillo de ARK presenta un diseño cilíndrico con una bola de acero inoxidable incorporada. Simplemente gire la punta en su Z-Vibe, encienda el Z-Vibe (opcional), luego gírelo sobre los músculos, a lo largo de los tendones y los nervios, y alrededor de los puntos de activación y las articulaciones. La vibración suave y el toque fresco del acero inoxidable brindan información sensorial que puede ser tanto relajante como para aliviar el estrés y el dolor. Enróllelo a lo largo del nervio cubital, a través de los músculos faciales, alrededor de los músculos de la ATM para relajar los dientes, alrededor de los nudillos para las personas con artritis, etc. NO debe usarse dentro de la boca.



Fabricado en EE. UU. Fabricado en EE. UU.

Mide aproximadamente 0,4 x 1,5"

Vendido Individualmente

Compatible con Z-Vibe o Z-Grabber (se vende por separado). No es compatible con el Z-Vibe original que solo tiene un extremo roscado.



Tenga en cuenta: cuando se usa con vibración, la bola de acero inoxidable se moverá/golpeará contra el plástico. Este ruido se silencia inmediatamente cuando comienzas a rodar la punta contra algo, pero puede no ser una buena opción para personas con sensibilidad auditiva.

Precaución: este artículo es una pieza pequeña que puede representar un peligro de asfixia. Esta herramienta terapéutica SÓLO debe ser utilizada por un terapeuta profesional o un cuidador capacitado en su uso. Este producto NO es para uso intraoral, morder o masticar. Cód. 10070