

Bite Tube Tip

Punta para Z Vibe®

Descripción

Desarrollada en asociación con Shari Martin, OTR/L, la punta de tubo de mordida de ARK para Z-Vibe® está especialmente diseñada para la práctica de mordida y masticación funcional y dirigida. Es muy parecido al Bite-n-Chew Tip XL, solo que con un centro hueco para la comida. Simplemente llene el tubo con alimentos blandos, como compota de manzana, yogur, alimentos para bebés de etapa 1, etc. Utilice la punta del tubo de mordida para establecer el concepto de necesidad de morder y masticar para comer. También es una excelente manera de incorporar alimentos reales mientras practica la planificación motora de las habilidades para comer.



El Bite Tube Tip viene en dos versiones diferentes: liso (lavanda) o texturizado (azul). Para personas con defensividad oral, comience con la punta suave y prograse gradualmente a la textura. Para las personas que necesitan más información propioceptiva en la boca, la textura proporciona información táctil y mayor resistencia. Para personas con una mordida débil, comience con una punta de tubo de mordida hueca y prograse a una punta de mordida sólida (la punta de mordida se vende por separado). Use cualquiera de estos consejos para mejorar el movimiento de masticación y la fuerza de la mandíbula. Si lo desea, puede recortar la punta del tubo de mordida a una longitud más corta con unas tijeras. ¡Una maravillosa adición a cualquier caja de herramientas de alimentación / terapia motora oral!



Fabricado en EE. UU., grado médico, cumple con la FDA.

Sin BPA, PVC, plomo, ftalatos o látex.

Mide aproximadamente 3 pulgadas de largo y poco menos de 0,5 pulgadas de diámetro.

Las puntas de tubo de mordida se venden individualmente.

Aptas para el lavavajillas

Para usar con cualquier Z-Vibe® o Z-Grabber® (se vende por separado)

Precaución: esta herramienta terapéutica debe usarse bajo la supervisión de un adulto en todo momento.

Bite Tube Texturado, color azul

Cód. 10091

Bite Tube Smooth- Liso, color lavanda

Cód. 10092