

Button Tip de ARK

Punta para Z Vibe®

Descripción

Los Button Tip de ARK son una forma divertida y atractiva de trabajar en el cierre y la fuerza de los labios, habilidades fundamentales necesarias para el desarrollo adecuado del habla y la alimentación. Son exactamente iguales que el conjunto proButton, pero están diseñados como accesorios de punta para el Z-Vibe® (Z-Vibe se vende por separado).

Los terapeutas del habla han estado haciendo una actividad de cierre de labios de "tirar de un botón" con sus clientes desde la década de 1970 atando una cuerda a través de los botones. El juego de puntas de botón de ARK ofrece una actualización más segura y profesional de ese clásico ejercicio de motor oral: ¡no más piezas pequeñas o cuerdas delgadas de las que preocuparse!

Las puntas de botón se venden en:

- un juego de 2 puntas amarillas- Yellow (los tamaños más pequeños) Cód. 10099 ó
- un juego de 2 verde azulado- Blue (los tamaños más grandes) Cód. 10100

Los botones amarillos tienen un diámetro de 0,5" y 0,6" (etiquetados como 1 y 2, respectivamente).

Los botones verdes azulados tienen 0,7" y 0,8" de diámetro (etiquetados 3 y 4, respectivamente).

Comenzando con el botón más grande que quepa cómodamente en la boca de la persona, coloque el "botón" dentro de los labios (frente a los dientes). Haga que la persona cierre los labios alrededor del botón mientras usted jala y hace un movimiento suave de "jalar y jalar"



para encontrar resistencia. Eventualmente, haga la transición a los botones de menor diámetro a medida que el individuo progresa.

Trabajar en el cierre de los labios puede ayudar a mejorar las habilidades para comer y beber, el control de la saliva, la producción de sonidos del habla y más.

Hecho en los EE. UU., grado médico, cumple con la FDA

Sin BPA, PVC, plomo, ftalatos o látex.

Cada punta mide alrededor de 2.5" de largo

Cada "botón" tiene un diámetro diferente (.5", .6", .7" y .8")

Aptas para el lavavajillas

Para usar con cualquier Z-Vibe® o Z-Grabber® (se vende por separado)

Se vende en un paquete de 2 (dos amarillos o dos verde azulado)

Precaución: esta herramienta terapéutica debe usarse bajo la supervisión de un adulto en todo momento.