

Placa de Resistencia Labial

Descripción

- La placa de resistencia labial para intervención Fonoaudiológica de tamaño grande se sugiere utilizar en personas a partir de los once años y en personas con arcos dentales más grandes. Está compuesta por un escudo cóncavo conectado a un anillo por medio de una varilla, formando una sola pieza.



- Está indicada como un recurso auxiliar para el fortalecimiento de la musculatura labial y facial (secundaria). Su uso puede contribuir al entrenamiento de los siguientes músculos; orbicular de los labios, risorio, buccinador, mentoniano, elevadores, masetero, temporal, pterigoideo medial. Además, pueden influenciar de forma indirecta sobre las funciones estomatognáticas.
- Su Utilización consistente en introducir la Placa entre la región vestibular oral anterior e inferior, procurando no entrar en contacto con el frenillo del labio superior ni inferior, para el adecuado acoplamiento intraoral.
- Para el entrenamiento de la musculatura labial, se pueden realizar diferentes ejercicios, por ejemplo, mantener la Placa en el vestíbulo mientras tira del anillo con su mano, ejerciendo resistencia para no soltarlo. Por otra parte, puede mantener la placa en el vestíbulo y ejercer resistencia hacia la comisura labial izquierda, derecha o al centro.

Características

- Producida con PVC de cristal no tóxico,
- Contiene 1 placa de resistencia labial (tamaño grande); 1 folleto
- Mediciones de la placa de resistencia labial para el tratamiento de terapia del habla (tamaño grande): escudo cóncavo: 60 mm de longitud lineal y 24 mm de ancho; anillo – 30 mm de diámetro exterior y 20 mm de diámetro interior; varilla – 7 mm de largo y 3 mm de ancho.

Código: 10107