

# Ejercitador Lingual ProFono

## Descripción

El Ejercitador de Lingual Profono, consta de dos bases de plástico en forma de U. La base superior se ajusta a los dientes superiores y la base inferior se ajusta sobre la lengua, favoreciendo el fortalecimiento de los músculos que proporcionarán su acoplamiento correcto del paladar.



Recomendado para trabajo en Motricidad orofacial – fortalece los músculos linguales intrínsecos (longitudinales y transversales superiores), los músculos linguales extrínsecos (estilogloso) y los músculos suprahioides (músculo digástrico y mioyideo). Con este fortalecimiento, la lengua puede elevarse, quedando cónica en la papila palatina, de manera más eficiente y en un tiempo más corto de reeducación. Los beneficios de este ejercicio son:

- Favorecer la postura correcta de la elevación de la lengua y el acoplamiento del paladar durante la primera fase de la deglución.
- Favorecer la respiración nasal habitual después de mantener la posición correcta de acoplamiento de la lengua en el paladar.
- Adelgazamiento de la lengua, lo que contribuye a la eliminación de las interposiciones frontales y laterales comunes en las mordidas abiertas;
- Fortalecimiento complementario del músculo orbicular de la boca superior, reduciendo el acortamiento del labio superior y manteniendo el tono y el sellado de los labios.

Recomendado para terapia Fonoaudiológica en estética facial y fisioterapia facial, como ejercitador tónico de los músculos suprahioides (digástrico y mioloiideo), lucha contra la flacidez muscular, especialmente en la región del cuello, ayudando a eliminar la “papada”.

Para su uso debe ajustar la base plástica superior del ejercitador lingual sobre los dientes superiores y permanecer entre los dientes y los labios. El acoplamiento no es a propósito estable y puede adaptarse a las diversas dimensiones de los arcos, lo que hace imposible sobrecargar los dientes superiores y estimula el músculo orbicular de la boca para que se contraiga para sostener el aparato.

### **Características**

- Contiene: 1 ejercitador lingual; 1 folleto del ejercitador lingual.
- El ejercitador lingual, consta de dos bases de plástico que miden aproximadamente 5 cm por 2 cm en la base superior y 4 cm por 4 cm en la parte inferior, en forma de U.
- Las dos bases de plástico están unidas por dos varillas de alambre de acero inoxidable de 0,7 mm de diámetro con una longitud total de 7,5 cm, con una bobina (efecto de resorte) en el centro de cada alambre de acero.

Código: 10112