

ARK'S ProButton®

2 unidades

Descripción

El conjunto proButton™ de ARK es una forma divertida y atractiva de trabajar en el cierre y la fuerza de los labios, habilidades fundamentales necesarias para el desarrollo adecuado del habla y la alimentación. Los terapeutas del habla han estado haciendo una actividad de cierre de labios de “tirar de un botón” con sus clientes desde la década de 1970 atando una cuerda a través de los botones. El conjunto proButton de ARK ofrece una actualización más segura y profesional de ese clásico ejercicio de motor oral: ¡no más piezas pequeñas o cuerdas delgadas de las que preocuparse!



Cada conjunto proButton™ incluye dos manijas de doble cara para un total de cuatro diámetros de “botón” diferentes. El mango amarillo tiene botones de 0,5" y 0,6" de diámetro (etiquetados 1 y 2, respectivamente). El mango verde azulado tiene botones de 0,7" y 0,8" de diámetro (etiquetados 3 y 4, respectivamente).

Comenzando con el botón más grande que quepa cómodamente en la boca de la persona, coloque el “botón” dentro de los labios (frente a los dientes). Haga que la persona cierre los labios alrededor del botón mientras usted jala y hace un movimiento suave de “jalar y jalar” para encontrar resistencia. Eventualmente, haga la transición a los botones de menor diámetro a medida que el individuo progresa.

Trabajar en el cierre de los labios puede ayudar a mejorar las habilidades para comer y beber, el control de la saliva, la producción de sonidos del habla y más.

- Hecho en los EE. UU., grado médico, cumple con la FDA
- Sin BPA, PVC, plomo, ftalatos o látex.
- Cada mango mide poco menos de 6" de largo

- Cada "botón" tiene un diámetro diferente (.5", .6", .7" y .8")
- Aptas para el lavavajillas
- Se vende en un juego (1 herramienta amarilla y 1 verde azulado)



Precaución: esta herramienta terapéutica debe usarse bajo la supervisión de un adulto en todo momento.

Código 10136