

# Pesas Labiales Pró-Fono (3 unidades)

- Las pesas labiales Pró-Fono fueron diseñadas por la Fonoaudióloga Elisa B. C. Altmann y su principal objetivo es fortalecer la musculatura de los labios, aumentando su tono mediante ejercicios isométricos.
- Este dispositivo puede ser utilizado en cualquier patología donde exista alteración de los labios, en cuanto a postura, movilidad y tono, por ejemplo, en deformidades maxilomandibulares, maloclusiones con problemas miofuncionales asociados y síndromes que afecten la región orofacial. Los labios son la parte más móvil del cuerpo debido a la gran cantidad de músculos faciales que actúan sobre ellos. Así, a través del labio mancuerna, trabajaremos no solo el orbicular de los labios, sino también, los buccinadores, el mentalis, el triangular, los platismas y otros.
- La mancuerna labial debe colocarse entre los labios, con los dientes debidamente ocluidos, pero sin forzar. Se centra la mancuerna y luego se solicita la oclusión del labio. Otro ejercicio que te proponemos es subir y bajar la mancuerna, sin ningún movimiento mandibular: primero se debe forzar el labio superior hacia abajo y luego el labio inferior hacia arriba.
- El ejercicio debe comenzar siempre con la pesa nº 1, de 40g. El cambio de la pesa nº 1 a la nº 2 o 3 (60g y 100g respectivamente), debe realizarse únicamente después de que el paciente sea capaz de permanecer aproximadamente 20 minutos consecutivos con la anterior. El tiempo de residencia debe aumentarse gradualmente, según la reacción de cada paciente. El uso de una pesa inadecuada puede provocar movimientos compensatorios, como una eversión exagerada del labio inferior o una protrusión mandibular.



## Características

- Está elaborado con poliestireno virgen de alto impacto y no tóxico.
  - 3 mancuernas para labios (Pesa nº1 40g / Pesa nº2 60g / Pesa nº3 100g).
  - Advertencia: El material sellado dentro de cada pesa es plomo (producto tóxico). Si el objeto sufre algún tipo de daño por accidente, no lo repare con pegamentos o cintas adhesivas. Reemplácelo inmediatamente por otro. La eliminación del producto, después de su vida útil o en caso de daño, debe realizarse en un relleno sanitario especial en su región.
- Código: 10145